



equimag expert

Programmwahl	Anwendung	Laufzeit in Minuten
P1 - Basis	<p>Einschleichen bei Erstbehandlungen über 1 – 2 Tage mit max. 50% Intensität</p> <p>Bei Entzündungen aller Art wie Gelenkentzündungen, Sehnenentzündungen</p> <p>Schwellungen, Wunden, Schmerzen, Kolik (nur Entkrampfung), Hufgeschwüren, akuten Atemwegserkrankungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Basis-Programm sollte Bestandteil jeder Behandlung sein. <p>Empfohlenes Programm mit 100% Intensität bei im Blutbild nachgewiesenen Entzündungen.</p>	20
P2 - Vital	<ul style="list-style-type: none"> Energieaufbau, bei Bewegungsmangel, im Training / zur Leistungssteigerung, zur Begünstigung der Darmperistaltik, bei chronischen Gelenkserkrankungen, begleitend bei Stallruhe, bei chronischen Atemwegserkrankungen und Allergien. 	12
P3 - Relax	<ul style="list-style-type: none"> Zur Regeneration bei Knochen-, Knorpel-, Sehnen-Beanspruchung, bei Muskelverspannungen und Nervosität sowie zur Regeneration nach dem Reiten (Schutz vor Muskelkater / Übersäuerung). 	16

Intensivstab

Der Intensivstab wird gewöhnlich zusammen mit der equimag Magnetfeld-Decke verwendet. Er dient der zusätzlichen Unterstützung lokaler, punktueller und eingehender Behandlung. Die Nutzung sollte eine Dauer von 3 - 5 Minuten nicht überschreiten. Das grundsätzlich empfohlene Programm ist P1. Im Einzelfall kann der Intensivstab auch als alleiniger Applikator und mit anderen Programmen angewendet werden.



equimag expert

Programmwahl	Anwendung	Laufzeit in Minuten
P4 – Basis & Vital	<ul style="list-style-type: none"> Zur Regulierung der Zell-Energie, Verbesserung des Gesamtstoffwechsels, für einen verbesserten und beschleunigten Heilungsprozess, einen besseren Blutfluss in den Gefäßen, eine bessere Versorgung der Muskulatur sowie des Organismus mit Nährstoffen, Lösen von Blockaden im Körper. 	32
P5 – Basis & Relax	<ul style="list-style-type: none"> Wenn keine Entzündungsprozesse angezeigt sind, wird die Körperfunktion reguliert und eine Entspannung, besonders nach der Arbeit, angeregt. Für eine Unterstützung der Knochen- und Knorpel-Regeneration, besonders bei Pferdesenioren. 	36
P6 – Vital & Relax	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Regulierung mit nachwirkender Entspannung. Besonders geeignet nach der Arbeit und/ oder zur Prophylaxe für den nächsten Tag. 	28
P7 - Basis & Vital & Relax	<ul style="list-style-type: none"> Anzuwenden wie P6, jedoch lindert es zusätzlich einen durch die Arbeit entstehenden Entzündungsvorgang; unterstützend auch im Einsatz bei nervösen Pferden. 	48
P8 - Prophylaxe	<ul style="list-style-type: none"> Programm für „Zwischenanwendungen“ wirkt mit allen Frequenzen von 1 bis 30 Hz. 	15

Die vorgenannten Empfehlungen basieren auf der equimag Forschung während der Entwicklung des impulsgebenden Steuergerätes an Tieren und Rückmeldungen unserer Anwender. equimag Therapiegeräte sind kein Ersatz für eine sorgfältige Diagnose und medizinische Therapie und sollten nur nach Rücksprache mit veterinärmedizinischem Fachpersonal und/oder Therapeuten angewendet werden. equimag haftet nicht für Anwendungsfehler oder Schäden, die durch die Anwendung der equimag Magnetfeld-Therapie entstehen.

Kurzbedienungsanleitung equimag expert Steuergerät

- (1) Stecken Sie einen Applikator (Magnetfelddecke, Gamasche, Halsteil oder Intensivstab) in eine der beiden Buchsen
Bei mehr als zwei Applikatoren gleichzeitig in der Behandlung nutzen Sie einen Y-Adapter, um zwei Applikatoren an einer Buchse zu betreiben.
- (2) Drücken Sie die ON/OFF Taste für ca. 1 Sekunde zum Einschalten des Geräts. Die kurz aufleuchtende Ziffer gibt in etwa den Ladestand der Akkus wieder. Ein roter Punkt in der Displayanzeige weist auf zu geringen Ladezustand der Batterien / Akkus hin.
- (3) Wählen Sie die gewünschte Intensität:
keine LED = 50%, LED blau = 100%
- (4) Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Programmtaste das gewünschte Programm P1 - P8
- (5) WICHTIG: Drücken Sie **erneut** die ON / OFF-Taste zum Start des gewählten Programms
- (6) Programmstart / -Ablauf kontrollieren:
blaue LED der Applikatorkontrolle leuchtet dauerhaft

Das Steuergerät schaltet automatisch ab:



- bei Programmende
- bei zu geringer Akkuleistung
- ohne angeschlossenem oder defektem Applikator
- bei fehlendem Programmstart (siehe 5)

Die ausführliche Anleitung finden Sie unter <https://t1p.de/equimag-info> (Scannen Sie den QR-Code).

36 Monate Garantie "equimag expert"



Auftrag / Kunde:

Auf alle equimag – Produkte gewähren wir neben der gesetzlichen Gewährleistung ab Kaufdatum von 24 Monaten beim Erwerb der Produkte über den Hersteller equimag GmbH weitere 12 Monate Herstellergarantie. Beim Kauf Ihrer Produkte über einen Händler oder equimag Beratungspartner wenden Sie sich zunächst an diesen primären Ansprechpartner.

Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Kabelbruch in den Applikatoren ist bei der Garantieleistung nicht eingeschlossen.

Versandkosten sind in der Garantieleistung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten nicht enthalten. Für Verschleiß am Steuergerät, den wieder aufladbaren Akkus und den Applikatoren übernimmt der Hersteller keine Garantie. Die Garantie beginnt ab Lieferdatum.

Die Garantie erlischt sofort:

- Bei technischen Veränderungen oder Reparaturversuchen am Steuergerät, den Applikatoren und dem Netzteil
- Bei unsachgemäßer, nicht bestimmungsgemäßer Behandlung und Gewalteinwirkung
- Bei unsachgemäßer Reinigung der Applikatoren
- Bei gewerblicher Vermietung

Im Garantiefall des Steuergerätes mit der Seriennummer EQ3E-22-xxx bitte das Gerät sicher vor Beschädigungen verpacken und ausreichend frankieren. Unfreie Sendungen werden nicht entgegengenommen.

Garantieleistungen können nur erfüllt werden, wenn Sie den Garantieschein oder den Kaufnachweis und im Falle des Garantieanspruchs des Steuergerätes ein Dokument (Rechnung, Lieferschein, Packschein, diese Garantiekarte) in Kopie mit Angabe der Seriennummer mit einsenden.