



Pulsierende Magnetfeldtherapie für Pferde & Kleintiere

Bauchgurt Verwendung

Der ca. 25 mm schmale Klettstreifen als auch das quer angebrachte Stück Hakenband am Ende des ca. 200 cm langen Bauchgurtes befinden sich auf der gleichen Seite des Bauchgurtes, wenn Sie diesen der Länge nach ausbreiten. Die Rückseite weist einen ca. 50 cm langen doppelten Klettstreifen auf.

1. Nehmen Sie die Gerätetasche so, dass der Ausschnitt quer und zu Ihnen nach vorne zeigt.
Das Leder-Etui / die Gerätetasche hat auf der Rückseite eine quer aufgenähte Lasche. Zwischen Lasche und Etui befindet sich ein aufgebrachter Hakenbandstreifen in Längsrichtung.
2. Das Gegenstück (ein schmaler Klettstreifen) findet sich am Bauchgurt wieder. Diese beiden Komponenten (Haken- und Klettband) müssen aufeinander kommen: Führen Sie nun das kürzere Stück des Bauchgurtes mit dem sichtbaren Stück des schmalen Klettstreifens von oben zwischen Lasche und Etui durch, bis der Klettstreifen erreicht ist. Das kürzere Ende des Bauchgurtes wird also nach unten aus dem Leder-Etui herausgeführt.
3. Da der schmale Klettstreifen auf dem Bauchgurt länger ist als das zugehörige Hakenband auf dem Leder-Etui, können Sie die Gerätetasche variabel in der Höhe am Pferd platzieren.
4. Das längere Stück des Bauchgurtes wird – von der Vorderseite des Leder-Etuis gesehen oben heraus – nun auf der Höhe des Widerrist über das Pferd gelegt und unter dem Bauch wieder hervorgezogen. Wir gehen davon aus, dass Sie dabei auf der linken Seite des Pferdes stehen.
5. Das kurze Stück Hakenband – quer zum Ende hin des längeren Stück des Bauchgurtes angebracht – wird nun auf dem Gegenstück des Klettbandes „eingehakt“, so dass der Bauchgurt zwar stramm um das Pferd sitzt, die Gerätetasche nicht weiter verrutschen kann, aber das Pferd nicht einengt oder gar der Darm abgeschnürt wird.
6. Verschieben Sie nun das Leder-Etui mit dem eingelegten Steuergerät nun soweit, dass Sie das Steuergerät einerseits gut bedienen können, das Pferd das Steuergerät aber nicht erreichen kann.